



SCHMIED INSTRUMENTAL QUIRURGICO Y EQUIPOS MEDICOS LTDA.

REPARACION, MANTENCION Y FABRICACION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO

REPARACION DE OPTICAS RIGIDAS

R.U.T: 76.097.973-2

DIRECCION: GERONIMO DE ALDERETE 1319, VITACURA - SANTIAGO

TELEFONO: (56) 2 2219 2212. WEB: www.schmied.cl CORREO: contacto@schmied.cl

INFORME TECNICO

DATOS DEL EQUIPO


FECHA	: 24 de Octubre de 2018	ENDOSCOPIO	: Laparoscopio 30°
SR.(A)	: CLINICA *****	MARCA	: Karl Storz
SERVICIO	: EQUIPOS MEDICOS	MODELO	: 26006 BEA
O.T.	: OR-165	N° SERIE	: 12011Y

IMÁGENES DEL EQUIPO

ANTES



DESPUES

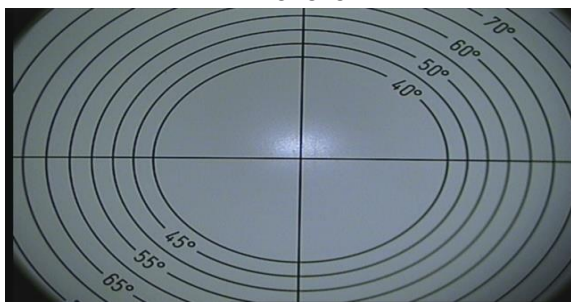

PARTES DEL ENDOSCOPIO

1.- VENTANA OK	: SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	6.- FIBRA OPTICA OK	: SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
2.- OBJETIVO OK	: SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	7.- OCULAR OK	: SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
3.- LENTES OK	: SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	8.- POSTE LUZ OK	: SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
4.- ESPACIADORES (: SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	9.- PIEZA DE OJO OK	: SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
5.- TUBO OK	: SI	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	10.- OTROS	: SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>

RESULTADOS CONTROL DE CALIDAD

A: CAMPO DE VISION	: 78°	E: LUZ	: Correcto
B: DIRECCION DE VISION	: 29,25°	F: TEST DE FUGAS	: Correcto
C: DESVIACION	: 1,5°	G: TEST DE CONDENSACION	: Correcto
D: IMAGEN/RESOLUCION	: 2'3	H:	

COMENTARIOS

La reparación de esta óptica consistió en cambiar el lente ocular (despegado) y dos lentes (quebrados).

FIRMA Q.C.